



 **COLTENE**
MicroMega

MICROMEGAN JUURIHOITOTUOTTEET

Kesäkuu 2024

HAMMASVÄLINE

MICROMEGAN JUURIHOITOTUOTTEET

Sisällysluettelo

	sivu
Dual Move, Dual-Pex	3
MicroMegan instrumenttien kierrosnopeudet ja vääntövoimat	4
One Flare	5
One G	6
2Shape Mini	8–9
One Curve Mini	10–11
One RECI	12–13
Remover	14
MM-EDTA Cream	15
MM-Seal	15
MM-MTA	15
HySolate kofferdamkumit	15
Hygenic Fiesta, klammerisetti	15
Wedjets, kofferdamkuminauhut	15

DUAL MOVE – uusi

Johdoton endomoottori sekä pyöriville, että respiprokkiliikettä tekeville instrumenteille



- Nopeuden ja väännön kontrolli
- Ohut, tasapainotettu, kevyt käsikappale
- Erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle
- Neulan automaattinen lukitus kulmakappaleeseen
- 340 astetta kääntyvä, pieni, siro kulmakappale
- Molempikätinen näyttö – pyörii 180 astetta
- Jatkuva pyörivä liike tai edestakainen respirokaatioliike
- rpm 120–1000 rpm
- Vääntö 0,5–4Ncm
- 6 ohjelmoitavaa paikkaa pyöriville neuloille ja 1 paikka respirokaatioliikettä tekeville neuloille

DUAL PEX

Elektroninen apex-mittari – käyttö yksin tai yhdessä Dual Move -endomoottorin kanssa

Selkeä näyttö, instrumentin tarkka paikannus niin kosteissa kuin kuivissakin kanavissa monitaajuisen paikanninteknologian ansiosta.



PAKKAUSKOOT

tuotenro

32890 MM Dual Move kit, kulmakpl ja moottori, 1 pkt

32891 MM Dual Pex, juurikanavamittari kit, 1 pkt

Lisätarvikkeet

33700 MM Dual Move, kulmakappale, 1 kpl

33701 MM Dual Move, kulmakappale suoja, 1 kpl

33702 MM Dual Pex, viilaklipsi, 1 kpl

33703 MM Dual Pex, huulikoukku, 1 kpl


MICROMEGAN PYÖRIVIEN INSTRUMENTTIEN KIERROSNOPEUDET JA VÄÄNTÖVOIMAT

	Koko	Koonisuus	Vääntövoima N.cm	Kierrosnopeus /min (rpm)
ONE FLARE®	25	9 %	3	250–400
One G	14	3 %	1,2	250–400
2Shape TS1 mini	25	4 %	2	250–400
2Shape TS2 mini	25	6 %	2,5	250–400
2Shape F35 mini	35	6 %	2,5	250–400
2Shape F40 mini	40	4 %	2	250–400
One Curve mini	25	4 %	2,5	300–450
One Curve mini	25	6 %	2,5	300–450
One Curve mini	35	4 %	2,5	300–450
One Curve mini	45	4 %	2,5	300–450
Remover	30	7 %	2,5	400–800

ONE FLARE® – pyörivä liike


NiTi-instrumentti kanavan koronaaliosan laajentamiseen

STERIILI, AUTOKLAVOITAVA

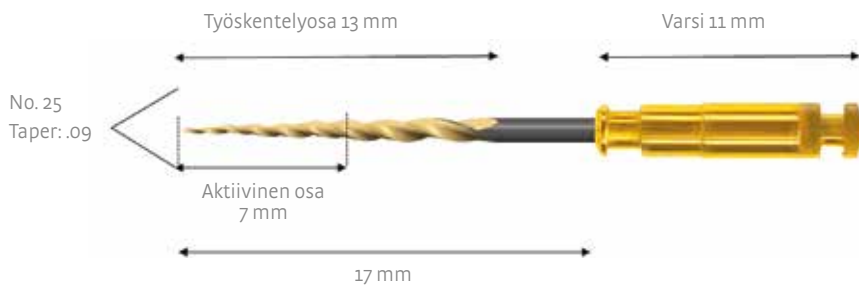

Uusi lämpökäsittely, mistä johtuen joustavampi työskentelyosa verrattuna Endoflaareen. Kestävämpi, steriilipakattu ja heti käyttövalmis! Voidaan autoklavoida ja uudelleenkäyttää. Uuden sukupolven steriili nikkelititaaninen laajennusinstrumentti.

One Flare laajentaa kanavan koronaalisen kolmanneksen ja parantaa kanavaa pääsyä. Hyvä laajennus sallii muiden instrumenttien työskennellä esteettömästi. Vähentää seuraavien instrumenttien stressiä ja katkeamisriskiä, luoden suoran linjan kanavan keski- ja apikaaliosaan. Puhdistaa ja paikallistaa kanavan suut. Estää baktereja kulkeutumasta kanavan seuraavaan kolmannekseen. Tämän kanavanosan laajennus tehdään käyttäen koonista laajennusinstrumenttia One Flarea. Voidaan käyttää kaikkien juurenhoitomenetelmien kanssa.

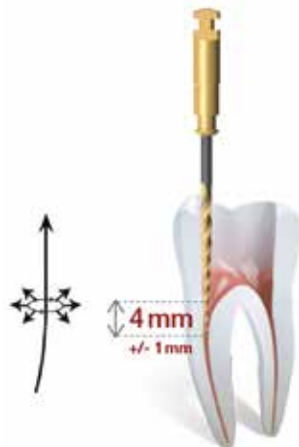

AINUTLAATUISET EDUT

Lämpökäsittely

- Parempi kesto
- Parannettu joustavuus

Steriili monikäyttöinen instrumentti

- Korkealuokkaista hammashoitoa ja juurihoitoa
- Uusi standardi hammashoitoon

ONEFLARE – TURVALLISEMMAT HOIDOT

One Flare tekee tilan muille

- Turvallinen eteneminen
- Eliminoi esteet juurikanavan suulta
- Juurikanavan avaaminen harjausliikkeellä
- Pääsy juurikanavaan
- Alentaa riskiä instrumentin tarttumisesta kanavan seinämiin työskentelyn aikana
- Koonisuus 9 %, koko 25
- Terän pituus 17 mm, josta työskentelyosan pituus 13 mm ja aktiivisen osan pituus 7 mm
- Ei-leikkaava kärki
- Positiivinen leikkauskulma
- Tehokas debriksen poisto

PAKKAUSKOOT

tuotenumero


One Flare steriili, 5 kpl

33788 One Flare 9 %, 17 mm/25

ONE G – pyörivä liike

Vain yksi pyörivä instrumentti liukupolun luontiin

STERIILI, KERTAKÄYTTÖINEN

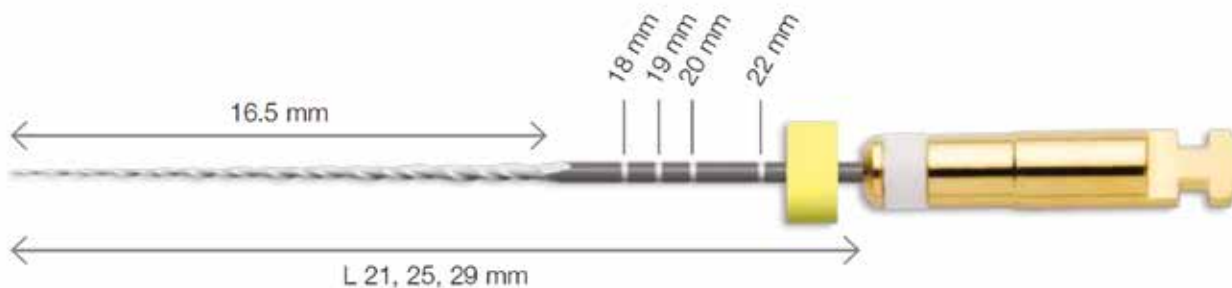

One G – et tarvitse muuta liukupolun luontiin

HELPPOUS | Vain yksi jatkuvasti pyörivä kertakäyttöinen instrumentti. Helppokäyttöinen, yksinkertainen ja nopea menetelmä.

TEHOKKUUS | Esilaajentaa juurikanavan tehokkaasti poistaen osan juurikanavan orgaanisesta sisällöstä. Säästää aikaa koko endodonttisessa hoidossa jättäen aikaa huuhteluun. Heti valmiit, steriilit ja kertakäyttöiset instrumentit. Viila hävitetään käytön jälkeen eikä sitä tarvitse käsitellä uudelleen.

TURVALLISUUS & LAATU | Käyttövarma. Instrumentti myötäilee ja ylläpitää juurikanavan alkuperäistä anatomiaa, etenee tasaisesti ja sillä on erinomainen kyky myötäillä kaarevia kohtia erityisesti ahtaissa ja käyrissä kanavissa. Katkeamisresistentti ja avautumaton innovatiivisen poikkileikkauksen ja kierrevälin ansiosta.

Vältä infektoriskit!

One G on steriilin pakkauksen ansiosta turvallinen potilaalle ja hammashoitajalle.



PAKKAUSKOOT

tuotenro

One G, steriili, 5 kpl

- 31715 One G 3 %, 21 mm/0.14
- 31716 One G 3 %, 25 mm/0.14
- 31717 One G 3 %, 29 mm/0.14




KÄYTTÖKOKEMUKSIA

“One G on erinomainen idea, koska se integroituu täydellisesti One Shape® Total Solution -ratkaisuun (yksi ainoa viila liukupolun luontiin ja sen jälkeen yksi viila juurikanavan muotoiluun). Tämä uusi instrumentti on paitsi helppokäyttöinen, myös säästää aikaa koko endodonttisessa hoidossa.

Esilaajennus on yksi tärkeimmistä vaiheista juurikanavan preparoinnissa, kun luodaan liukupolku ennen NiTi-viilojen käyttöä kanavan muotoiluun, tarkemmin sanoen yksiviila-järjestelmä.

One G on viimeisin juurihoitoja helpottava innovaatio. Juurihoito ei ole koskaan ollut näin helppoa! Yksi ainoa instrumentti liukupolun luontiin, yksi instrumentti kanavan muotoiluun.”

Dr. Alberto DAGNA (Italia)

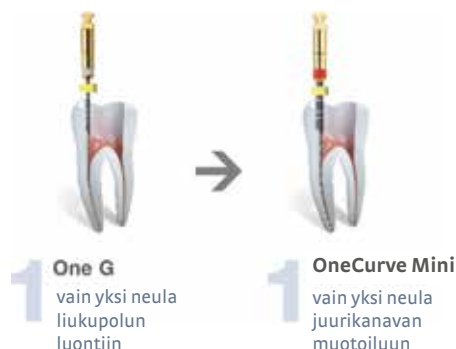



2SHAPE MINI

*Kaksi instrumenttia
juurikanavan
muotoiluun*



ONECURVE MINI

*Yksi instrumentti
juurikanavan muotoiluun*

*Näille mini-instrumenteille
löytyvät myös uudet
guttaperkka- ja paperinastat.*

2SHAPE MINI® – uusi mini – invasiivinen

Langan halkaisija vain 1 mm

STERIILI, AUTOKLAVOITAVA



T.Wire

Uudet ainutlaatuiset edut

- **Lisää turvallisuutta materiaalikäsittelystä:**
Patentoitu T.Wire-lämpökäsittely, mistä johtuen **joustava**, kestää paremmin rasitusta (+ 40 %) ja myötäilee juurikanavan anatomiaa.
- **Entistäkin laadukkaampi muotoilujälki:**
Uusi epäsymmetrinen poikkileikkaus. 2 primääristä leikkausterää; erinomainen leikkausteho. 1 sekundäärinen leikkausterä; parempi debriksen poisto.
- **Protokollan helppous oppia ja käyttää:**
Kaksi pyörivää muotoiluinstrumenttia, TS1 ja TS2 jotka viedään suoraan työskentelypituuteen (WL).
- **Ei vaadi erillistä moottoria**, voidaan käyttää kaikkien pyöriville instrumenteille sopivien endomoottorien kanssa (esim. WaveOne) tai endokulmakappaleessa.
- NiTi, steriili ja uudelleen steriloitava.

Protokolla

One Flare

One G

TS1 mini

TS2 mini



250-400 rpm
Max torque 3 N.cm




250-400 rpm
Max torque 1.2 N.cm



250-400 rpm
Max torque 2 N.cm



250-400 rpm
Max torque 2.5 N.cm

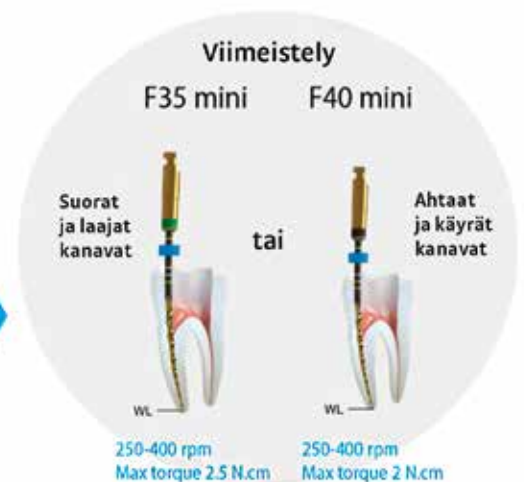

Viimeistely

F35 mini

F40 mini

Suorat
ja laajat
kanavat

tai

Ahtaat
ja käyrät
kanavat

250-400 rpm
Max torque 2.5 N.cm

250-400 rpm
Max torque 2 N.cm

INSTRUMENTIT TS1 MINI JA TS2 MINI

KÄYTTÖ

- Progressiivinen liike kolmessa vaiheessa (3 edestakaista liikettä) ylöspäin kiertävällä viilaavalla liikkeellä.
- Vie pyörivä instrumentti juurikanavaan kunnes tunnet vastusta. Kun vastusta tuntuu, tee pyörivä harjaava liike estääksesi primaarista ahtautumista. Vastusta tuntiessasi vedä instrumentti pois, puhdista instrumentti ja huuhtelee juurikanava. Jatka progressiivista alaspäinvientiä, kunnes työskentelypituus on saavutettu. 2–3 käyntikertaa riittää yleensä työskentelypituuden saavuttamiseen.
- 2Shape Mini sopii käytettäväksi lähes kaikissa juurihoitotapauksissa.*

* lukuun ottamatta harvoja anatomisia poikkeavuuksia

EPÄSYMMETRINEN POIKKILEIKKAUS

- Vähentää instrumentin katkeamisriskiä.
- Lisää pyörivän harjausliikkeen tehoa tehokkaaseen puhdistukseen.

TURVALLISTA JUURIHOITOA

- Parempi kestävyys ehkäisee instrumentin rikkoontumista.
- Joustavampi.

T.WIRE -TEKNOLOGIA

Patentoitu juurikanavan lämpökäsittelyprosessi

- Parempi kaarevuuksien myötäileminen.
- Nikkelititaanin tuoma elastisuus.



PAKKAUSKOOT

tuotenro

2Shape Mini 21 mm, 5 kpl

- 303250 2Shape Mini TS1 4 %, 21 mm/25
- 303251 2Shape Mini TS2 6 %, 21 mm/25
- 303252 2Shape Mini F35 6 %, 21 mm/35
- 303253 2Shape Mini F40 4 %, 21 mm/40


2Shape Mini 25 mm, 5 kpl

- 303254 2Shape Mini TS1 4 %, 25 mm/25
- 303255 2Shape Mini TS2 6 %, 25 mm/25
- 303256 2Shape Mini F35 6 %, 25 mm/35
- 303257 2Shape Mini F40 4 %, 25 mm/40

2Shape Mini 31 mm, 5 kpl

- 303258 2Shape Mini TS1 4 %, 31 mm/25
- 303259 2Shape Mini TS2 6 %, 31 mm/25
- 303260 2Shape Mini F35 6 %, 31 mm/35
- 303261 2Shape Mini F40 4 %, 31 mm/40
- 303262 2Shape Mini Procedure Pack 25


2 primääristä leikkausterää;
erinomainen leikkausteho

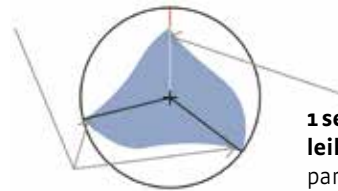

1 sekundäärinen leikkausterää;
parempi debriksen poisto, vähentää instrumentin ahtautumista



Joustava, kestävä paremmin rasitusta.

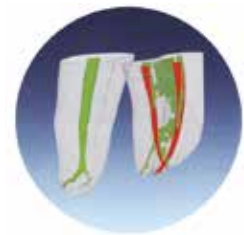

Myötäilee juurikanavan alkuperäistä anatomiaa, puhdistaa juurikanavan tehokkaammin.

303262 2Shape Mini, Procedure Pack 25

Sisältää 1 kpl One G, 1 kpl One Flare, 1 kpl K-viila no 10, 1 kpl 2Shape TS1 Mini 4 % 25 mm/25, sekä 1 kpl 2Shape TS2 Mini 6 % 25 mm/25.

tuotenro

Paperinasta 2Shape Mini, steriili, 36 x 4 kpl

- 303312 Paperinasta TS1 2Shape Mini 4 %, 25
- 303313 Paperinasta TS2 2Shape Mini 6 %, 25
- 303314 Paperinasta F35 2Shape Mini 6 %, 35
- 303315 Paperinasta F40 2Shape Mini 4 %, 40

Guttaperkkanasta 2Shape Mini, 60 kpl


- 303308 Guttaperkkanasta TS1 2Shape Mini 4 %, 25
- 303309 Guttaperkkanasta TS2 2Shape Mini /OneCurve Mini 6 %, 25
- 303310 Guttaperkkanasta F35 2Shape Mini 6 %, 35
- 303311 Guttaperkkanasta F40 2Shape Mini /OneCurve Mini 4 %, 40



ONE CURVE MINI[®] –pyörivä liike

Yksi instrumentti juurikanavan muotoiluun


STERIILI, KERTÄKÄYTTÖINEN

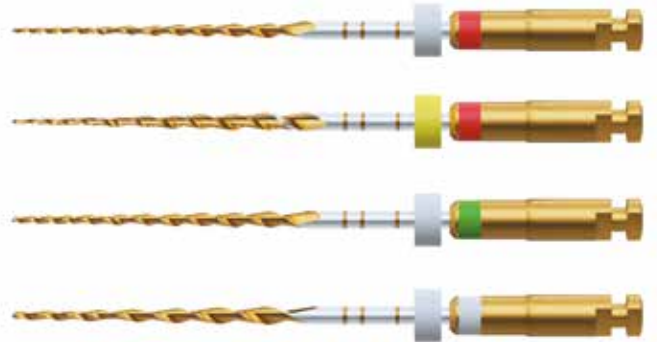

Uudet ainutlaatuiset edut

- Valintasi mukaan vain yksi instrumentti kanavan muotoiluun – säästää aikaa.
- Kertäkäyttöinen – vähentää kontaminaatoriskiä.
- Steriili
- C.Wire-lämpökäsittely ja NiTi-materiaali – 2,4 kertaa kestävämpi kuin perinteisest NiTi-instrumentit metallin väsymisen aiheuttamaa murtumisriskiä vastaan.
- Erittäin joustava, sopii kaikkiin juurikanaviin, jopa erittäin käyriin ja silti leikkaa tehokkaasti.
- Instrumentti voidaan esitaivuttaa ja sillä on muotomuisti – poistaa esteet juurikanavan suulta – helpottaa instrumentin viemistä kanavaan.
- Säilyttää juurikanavan muodon erityisesti apikaalialueella – ei vaaraa huuhteluaineiden tai juurentäyteaineiden kulkeutumiseen apikaalialueen yli.

Valitse sopiva koko One Curve mini instrumentistä ja etene sen protokollan mukaisesti.

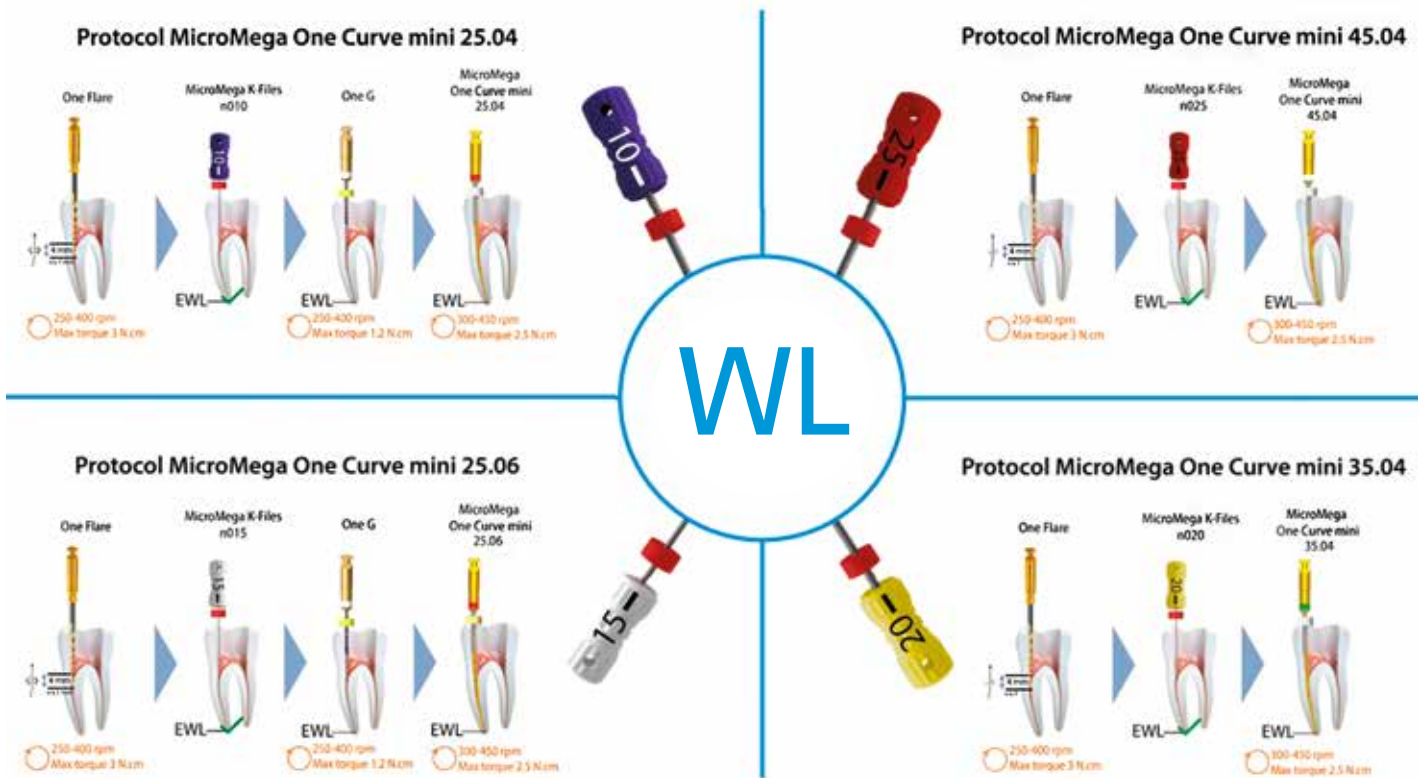



Jatkuva pyörimisliike.
Nopeus 300 kierrosta/min,
vääntömomentti 2,5 Ncm.
Tasainen eteneminen työskentelypituuteen.
Preparointi vie vähemmän aikaa.
Anatomialtaan yksinkertaisten ja haasteellisten.
Juurikanavien preparointiin.

Instrumentti on erittäin joustava ja samalla
äärimmäisen kestävä ilman aggressiivista
porautumista juurikanavaan.
Hallitset instrumenttia täydellisesti.



Mukailee juurikanavan muotoa muuttamatta sitä.
Vaihtuva poikkileikkaus yhdistettynä jatkuvaan pyörimisliikkeeseen varmistaa
erinomaisen leikkaustehon ja täydellisesti keskitetyn preparoinnin.



303277 One Curve Mini 6 %, Procedure Pack 25

Sisältää 1 kpl One Flare no. 25, 1 kpl K-viila no 10,
1 kpl One G no 14, 1 kpl K-viila no 15 sekä
1 kpl One Curve Mini 25 mm/25 6 %.

PAKKAUSKOOT

tuotenro

One Curve Mini 21 mm, steriili, 5 kpl

303264 One Curve Mini 4 %, 21 mm/25
303273 One Curve Mini 6 %, 21 mm/25
303265 One Curve Mini 4 %, 21 mm/35
303266 One Curve Mini 4 %, 21 mm/45

One Curve Mini 25 mm, steriili, 5 kpl

303267 One Curve Mini 4 %, 25 mm/25
303274 One Curve Mini 6 %, 25 mm/25
303268 One Curve Mini 4 %, 25 mm/35
303269 One Curve Mini 4 %, 25 mm/45

One Curve Mini 31 mm, steriili, 5 kpl

303270 One Curve Mini 4 %, 31 mm/25
303275 One Curve Mini 6 %, 31 mm/25
303271 One Curve Mini 4 %, 31 mm/35
303272 One Curve Mini 4 %, 31 mm/45

303263 OneCurve Mini 25 mm, lajitelma, steriili, 4 kpl

tuotenro

One Curve Mini Procedure Pack

303276 One Curve Mini 4 %, 25 mm/25
303277 One Curve Mini 6 %, 25 mm/25
303278 One Curve Mini 4 %, 25 mm/35

Paperinasta One Curve Mini, steriili, 36 x 4 kpl

303304 Paperinasta One Curve Mini 4%, 25
303307 Paperinasta One Curve Mini 6%, 25
303305 Paperinasta One Curve Mini 4%, 35
303306 Paperinasta One Curve Mini 4%, 40

Guttaperkkanasta One Curve Mini, 60 kpl

303300 Guttaperkkanasta One Curve Mini 4 %, 25
303309 Guttaperkkanasta One Curve Mini / TS2 2Shape Mini 6 %, 25
303301 Guttaperkkanasta One Curve Mini 4 %, 35
303311 Guttaperkkanasta One Curve Mini/ F40 2Shape Mini 4 %, 40



ONE RECI – resiprokaatioliike 170°/60°

Juurihoitoinstrumentti

STERIILI, KERTÄKÄYTTÖINEN

Lämpökäsittely joustava, mutta riittävän tehokas.
Valitaan yksi instrumentti, jolla kanava muotoillaan,
joko 20.04, 25.04, 25.06, 35.04 tai 45.04.
Lajitelma 5 kpl tai refillit 5 kpl. Pituudet 21/25 ja 31 mm.

TURVALLISUUS | Kestävä lämpökäsittelyn ja
resiprokaatioliikkeen ansiosta.

LEIKKAA TEHOKKAASTI | Epäsymmetrinen instrumentin
poikkileikkaus ja muoto takaa tehokkuuden ja depriksen hyvän
ulostuonnin sekä instrumentin pysymisen kanavan keskellä.

JOUSTAVA | C.Wire-lämpökäsittely.
Voidaan esitaivuttaa, säilyttää esitaivutetun muotonsa.
Seuraa kanavan anatomiaa.

MINIMAALISEN INVASIIVINEN | Metallin halkaisija
on vain 1 mm, mikä säästää kanavan perikervikaalista aluetta
ja ympäröivää hammaskudosta.



PAKKAUSKOOT

tuotenro

One RECI 21 mm, steriili, 5 kpl

302201 One RECI 4 %, 21 mm/20
302202 One RECI 4 %, 21 mm/25
302205 One RECI 6 %, 21mm/25
302203 One RECI 4 %, 21 mm/35
302204 One RECI 4 %, 21 mm/45

302200 One RECI 21 mm, lajitelma

One RECI 25 mm, steriili, 5 kpl

302207 One RECI 4 %, 25 mm/20
302208 One RECI 4 %, 25 mm/25
302211 One RECI 6 %, 25 mm/25
302209 One RECI 4 %, 25 mm/35
302210 One RECI 4 %, 25 mm/45

302206 One RECI 25 mm, lajitelma

One RECI 31 mm, steriili, 5 kpl

302213 One RECI 4 %, 31 mm/20
302214 One RECI 4 %, 31 mm/25
302217 One RECI 6 %, 31 mm/25
302215 One RECI 4 %, 31 mm/35
302216 One RECI 4 %, 31 mm/45

302212 One RECI 31 mm, lajitelma

tuotenro

Paperinasta One RECI, steriili, 144 kpl

302218 Paperinasta One RECI 4 %, 20
302219 Paperinasta One RECI 4 %, 25
302222 Paperinasta One RECI 6 %, 25
302220 Paperinasta One RECI 4 %, 35
302221 Paperinasta One RECI 4 %, 45

Guttaperkkanastat One RECI, 60 kpl

302223 Guttaperkkanasta One RECI 4 %, 20
302224 Guttaperkkanasta One RECI 4 %, 25
302227 Guttaperkkanasta One RECI 6 %, 25
302225 Guttaperkkanasta One RECI 4 %, 35
302226 Guttaperkkanasta One RECI 4 %, 45


Steriilit paperinastat



Guttaperkkanastat



Protocol MicroMega One RECI

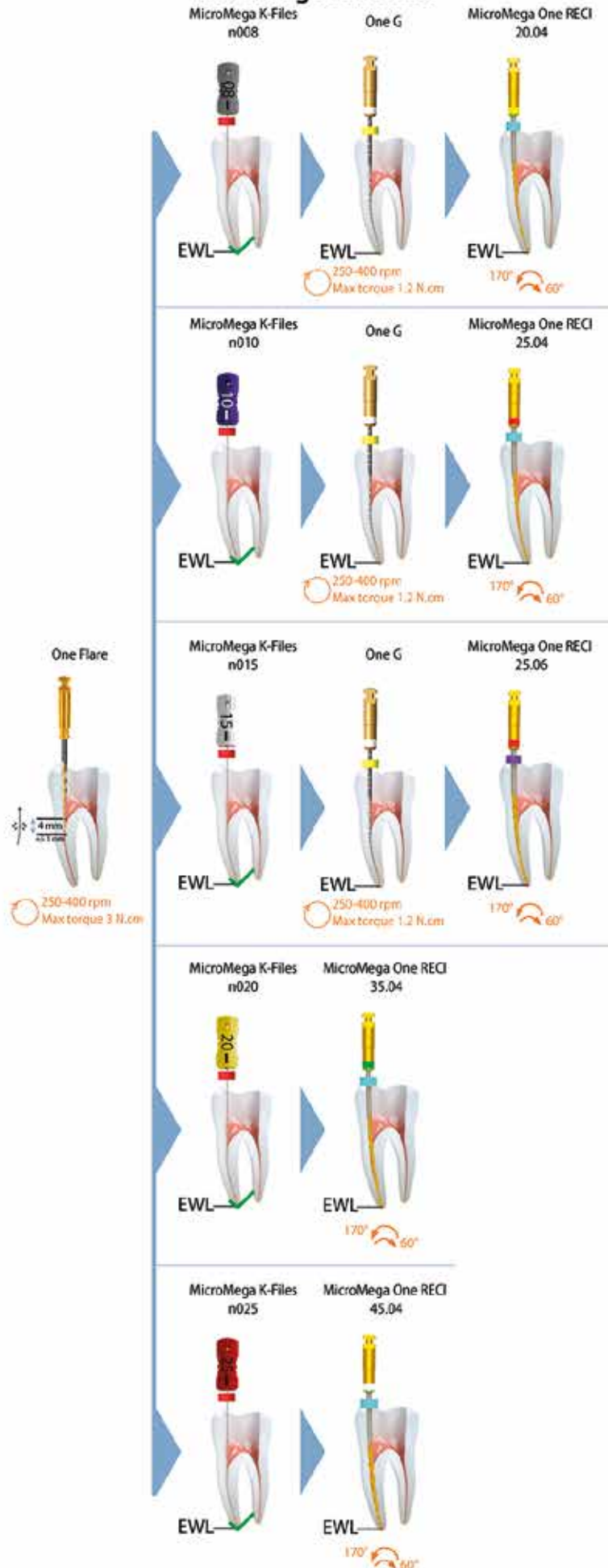

REMOVER – pyörivä liike

Yksi instrumentti uusintajuurihoitoihin vanhan juuritäytteen poistoon

STERIILI, KERTAKÄYTTÖINEN

MicroMega Remover on juurikanavan anatomiaa kunnioittava kertakäyttöinen instrumentti vanhan juurentäyte-materiaalin poistoon,*1.



REMOVERIN EDUT

- Poistaa vanhat guttaperkkatäytteet
- Ei tarvetta liuottimien käytölle
- Ainutlaatuinen pyörivä instrumentti, joka seuraa kanavan anatomiaa
- Poistaa tätemateriaalin tehokkaammin ja turvallisemmin
- Helppo, menetelmän oppimiseen ei kulu aikaa



TURVALLINEN: EI-AKTIIVINEN KÄRKI

C.Wire-lämpökäsittely parantaa instrumentin joustavuutta. Removerissa on Coltene MicroMegan viimeisimmän sukupolven poikkileikkaus, missä on kolme leikkaavaa terää. Lämpökäsittely yhdistettynä ei-leikkaavaan kärkeen varmistaa sen, että instrumentti seuraa kanavan anatomiaa ja tekee tätemateriaalin poistosta turvallisemman.

Koko 30, koonisuus 7 %, pituudet 19 mm ja 23 mm

MicroMega Remover on olennainen osa hammaslääkärin työskentelyprosessia. Se mahdollistaa perinteisten muotoiluinstrumenttien käytön vanhan tätemateriaalin poiston jälkeen. Kaikkien näiden ominaisuuksiensa ansiosta Removerilla voidaan tehdä uusintajuurihoidot turvallisemmin uudelleentoistettavalla metodiikalla.

*1 MicroMega data "Validation report of Remover: Pr Franck Diemer, ICRE. Evaluation du One Flare en désobturation. Evaluation d'un instrument de désobturation: le Remover." 2019,10

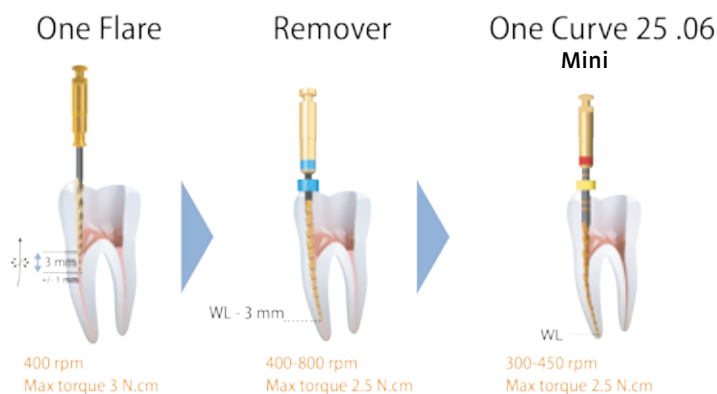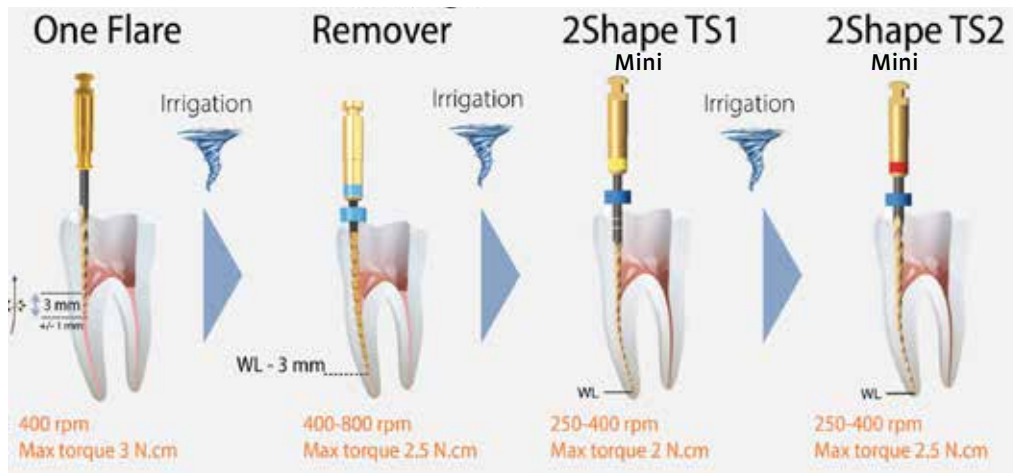

PAKKAUSKOOT

tuotenro

Remover, steriili, 5 kpl

301440 Remover 7 % 19 mm/30

301441 Remover 7 % 23 mm/30

MM-EDTA CREAM

EDTA-geeli

MM-EDTA Cream tekee jokaisesta hoitovaiheesta helpon! Se takaa tehokkaan puhdistuksen ja juurikanavien muotoilun, voitelee, helpottaa viilan kulkua ja läpäisyä sekä säästää aikaa.



MM-SEAL™

Juurikanavatäyteaine

Erittäin korkealaatuinen epoksiresiini-pohjainen sekoitettava pasta-pastasealeri juurikanavan pysyvään täyttämiseen guttaperkkaa käyttäen.

Sen ylivoimaiset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet takaavat erinomaisen juurikanavan sulkemisen. Materiaali ei sisällä eugenolia, se on kudosturvallinen ja radiopaakki ja sitä voi käyttää kaikenikäisiin guttaperkkatäytteisiin.



MM-MTA

Endodonttinen korjaussementti

Annoskapselissa. Kovettuu nopeasti, pastamaisen koostumuksen ansiosta helppo käsitellä ja viedä paikoilleen. Soveltuu käytettäväksi juurikanavaperforaatioiden korjauksiin, juurenpäätytteisiin, pulpan kattamisiin sekä sisäisten resorptioiden korjaamiseen.



HY SOLATE FLEXIDA

Kehystetty

Lateksiton, synteettinen, kofferdamkumi, jossa on joustava ja kiinteä kehys, mikä säästää aikaa ja on helppo asettaa. Elastinen materiaali, joka ei repeydy. Muovikehyksen sileä pinta on potilaalle maksimaalisen mukava ihoa vasten. Väri punavioletti. Työskentelykoko 100 mm x 105 mm.



HY SOLATE MUSTA, OHUT JA MEDIUM

Kofferdamkumit

Lateksinen, puuteriton, ohut ja medium. Koko 152 x 152 mm. Musta väri, hyvä kontrasti. Valmiit hammaskaaren kuvat nopeuttavat työskentelyä.



HYGENIC FIESTA

Klammerisetti

Värikoodattu, mattapintainen siivellinen klammeri. Klammerit on helppo säilyttää omissa, ruostumattomasta teräksestä valmistetussa telineessä, jossa on jokaiselle klammerille oma, värein merkitty paikka.

Pakkaus sisältää klammerit: 2 premolaari, 2A premolaari, 4 molaari pieni, 7 molaari, 8A molaari pieni, 9 etualue, 12A alamolaari, 13A alamolaari, 14A molaari.



WEDJET

Kofferdamnauhat

Voidaan käyttää klammerin sijaan.

Lateksinen keltainen koko S. Lateksittomat vihreä koko S ja sininen koko L.



PAKKAUSKOOT

tuotenro

- 09640 MM-EDTA Cream, geeli 2 x 5,4 ml + 10 kpl kärjet
- 09643 MM-Seal-juurikanavatäytemateriaali, 1 x 13,5 g
- 36593 MM-MTA-korjaussementti, refilli, 2 x 0,3 g
- 34071 HySolate Flexi Dam framed, kofferdamkumi, 20 kpl


tuotenro

- 307593 HySolate ohut musta, kofferdamkumi, 36 kpl
- 307594 HySolate medium musta, kofferdamkumi, 36 kpl
- 37808 Hygenic Fiesta, klammerisetti, 9 kpl
- 86812 Wedjets S, keltainen, lateksinen klammerikuminauha, 2m
- 301415 Wedjets S, vihreä, lateksiton klammerikuminauha, 2 m
- 301416 Wedjets L, sininen, lateksiton klammerikuminauha, 2 m

JUURIKANAVAMOOTTORI APEXMITTARILLA

CanalPro X-Move

Endomoottori Kit

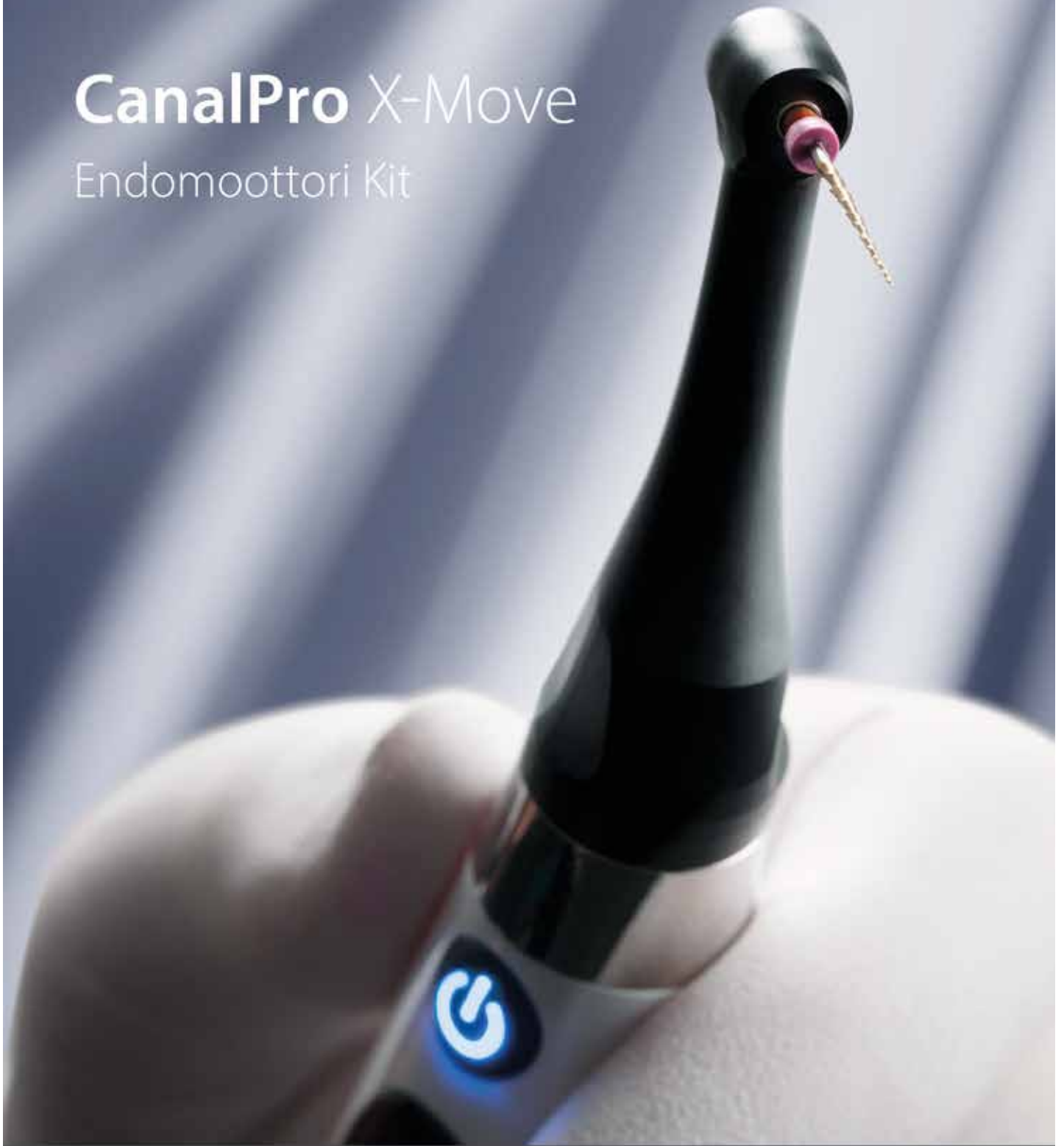

 COLTENE

HAMMASVÄLINE

HAMMASVÄLINE OY | PL 15, 02101 Espoo | Asiakaspalvelu, p. 010 588 6100 | kauppa.hammasvaline.fi | www.hammasvaline.fi